

Zwei Schleifkörper für Vorarbeiten und zum Glätten

NEU: DiaKap und MeiKap

Das Entfernen von überschüssiger Hornhaut gehört zum Tagesgeschäft jedes Fußpflegers. Dabei ist Hornhaut nicht gleich Hornhaut. Und Sie verwenden daher auch unterschiedliche Instrumente zum Abtrag und anschließendem Glätten.

GERLACH bietet Ihnen jetzt zwei neue Schleifkörper zur Hornhautbearbeitung an, mit denen Sie den speziellen Anforderungen bei dieser Tätigkeit noch besser gerecht werden.



DiaKap: Auch bei Arbeiten auf hartnäckiger Hornhaut sorgen die versetzten Bohrungen und die geringere Wandstärke für die notwendige Kühlung



MeiKap: Der strapazierfähige und langlebige MeiKap ist ideal zum feinen Schleifen geeignet

DiaKap – Schleifkörper für „Härtefälle“

Mit der neuentwickelten diamantierten Oberfläche lassen sich

- effektive Vorarbeiten an hartnäckigen Hornhautarealen durchführen
- und auch dicke, große Nägel wie z. B. Holznägel hervorragend bearbeiten.

Damit sich die abzutragenden Areale für den Patienten nicht unangenehm erwärmen, sorgen spezielle versetzte Bohrungen für die notwendige Kühlung.


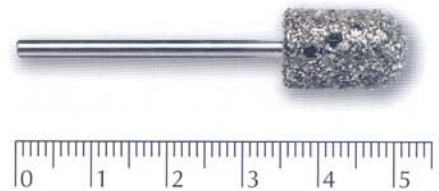


Abbildung DiaKap „mittel“ in Originalgröße

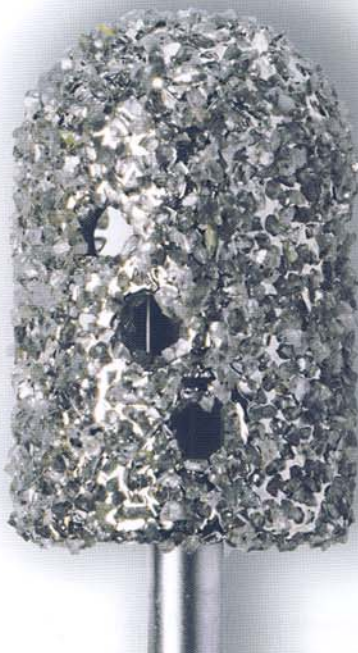

Vorteile

- Diamantbeschichtung: stärkere Korngröße, scharfkantiger für effektives Schleifen
- neu entwickelte Struktur der diamantierten Oberfläche: verhindert ein Zusetzen der Schleiffläche
- neue Kappenform: Versetzte Bohrungen und geringere Wandstärke ermöglichen wirksamere Innenkühlung und sorgen für erheblich reduzierte Wärmeentwicklung
- ausgezeichnete Laufruhe und schneller Abtrag von Hornhaut und Nagelmaterial
- für Fußpflegemotore mit Absaug- und Sprayvorrichtung gleichermaßen gut geeignet
- beste Arbeitsergebnisse beim optimalen Drehzahlbereich von 5.000 bis 10.000 U/min. bzw. 5.000 bis 8.000 U/min. bei dem großen Instrument
- zeitgemäße Instrumentenhygiene durch Reinigung und Desinfektion im Ultraschallbad und anschließender Sterilisation im Heißluft-Sterilisator oder Autoklaven
- rostfrei

Die Anordnung der Querschneiden beim DiaKap-Schleifkörper ermöglicht einen gleichmäßigen sauberen Abtrag

MeiKap – Schleifkörper zum Glätten

Der neue Schleifkörper ersetzt perfekt bisher verwendete Einmalinstrumente und wurde im Anwendungstest von den Patienten als äußerst angenehm gelobt. Durch eine neuartige Belegungs- und Befestigungstechnik werden die Hartmetallsplitter auf dem Grundkörper verteilt und die Haltekräfte sind optimiert. Dieser neue Schleifkörper eignet sich in besonderem Maße zum

- Glätten vorbereiteter Oberflächen
- feinen Schleifen
- Abtrag von sehr losem Material wie beispielsweise schuppiger Areale auf dicker Hornhaut.

Die Hartmetallsplitter bilden jetzt eine kompakte Einheit auf dem Grundkörper. Ihr Instrument lässt sich einfacher reinigen und ist strapazierfähig und langlebig. Die neue Kappenform mit drei versetzten Bohrungen leitet entstehende Wärme ab und erlaubt ein für den Patienten angenehmes Arbeiten.




Vorteile

- beschichtet mit äußerst effektiven Hartmetallsplittern gleichmäßiger Splittergröße
- ruhiges (schlagfreies) Arbeiten durch geringste Rundlaufabweichung
- für die Patienten angenehm „kühles“ Abtragen von Hornhaut – Überhitzungserscheinungen werden durch die versetzten Bohrungen vermieden
- für Fußpflegemotore mit Absaug- und Sprayvorrichtung gleichermaßen gut geeignet
- optimaler Drehzahlbereich von 5.000 – 10.000 U/min. bzw. 5.000 – 8.000 U/min bei dem großen Instrument liefert beste Arbeitsergebnisse. Angenehm für den Patienten und für Sie gut handhabbar
- offene Struktur der Hartmetallsplitter verhindert das Zusetzen der Schneiden
- sehr gute Reinigungseigenschaften. Optimale Instrumentenhygiene durch Reinigung und Desinfektion um Ultraschallbad und anschließende Sterilisation im Heißluft-Sterilisator oder Autoklaven
- rostfrei

Mit dem MeiKap-Schleifkörper steht Ihnen ein langlebiges Instrument zum feinen Schleifen zur Verfügung



Abbildung MeiKap „mittel“ in Originalgröße

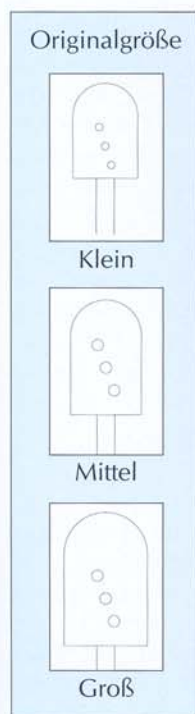

Unser Einführungsangebot für Sie:

Schleifkörpergröße	Artikel	MP	Bestell-Nr.	Normalpreis in Euro	Sonderpreis in Euro
DiaKap					
Klein	881PS104085	CE	307 224 100	25,90	23,60
Mittel	881PS104095	CE	307 224 200	29,80	26,70
Groß	881PS104115	CE	307 224 300	33,60	30,40
MeiKap					
Klein	80Z4104085	CE	307 300 400	25,90	23,60
Mittel	80Z4104095	CE	307 300 500	29,80	26,70
Groß	80Z4104115	CE	307 300 600	33,60	30,40

Preise zzgl. MwSt.
Angebote gültig bis 28. Februar 2004